

Elite+ Reinigungs- und Desinfektionsanleitung

Reinigung der äußeren Bestandteile

Cynosure empfiehlt, die Außenflächen des Lasersystems regelmäßig zu reinigen und zu desinfizieren. Schalten Sie das System vor der Reinigung stets aus.

Reinigung der Außenflächen des Systems

1. Reinigen Sie die Außenflächen des Lasersystems mit einem weichen Tuch, einem mildem Reiniger und Wasser.
2. Falls erforderlich, desinfizieren Sie die Außenteile des Geräts mit einem Desinfektionsmittel in Krankenhausqualität.
3. Achten Sie darauf, die Handstückablage auf der Rückseite des Lasersystems zu reinigen und zu desinfizieren.

Reinigung des Displays

1. Bereiten Sie eine milde Seifenlauge zu.
ACHTUNG: Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel, Säuren oder Alkalilösungen auf dem Display, da es dadurch beschädigt werden kann.
2. Tauchen Sie ein weiches Tuch in die Lösung und wringen Sie dann das Wasser aus dem Tuch aus.
3. Wischen Sie die Oberfläche des Displays mit dem angefeuchteten Tuch ab.

Reinigung des Kalibrierports (CAL)

Das Fenster im Kalibrierport muss stets sauber sein, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.

WARNHINWEIS: Ein unsauberes Fenster kann zu einer falschen Fluenz und in der Folge zu Verletzungen des Patienten führen.

1. Kontrollen Sie den Kalibrierport zwischen den Patienten auf Rückstände.
2. Reinigen Sie das Fenster mit einem fusselfreien Tuch, wenn Rückstände vorhanden sind.

Reinigung und Desinfektion der Handstückteile

Der Handstückhalter, das Handstück, die Handstückspitze und das Handstückfenster sollten nach jeder Behandlung wie folgt gereinigt und desinfiziert werden:

1. Verwenden Sie sowohl zur Reinigung als auch zur Desinfektion ein weiches Tuch.
 2. Mit einem milden Reiniger und Wasser reinigen.
 3. Achten Sie darauf, die Optik nicht mit Reinigungs- oder Desinfektionsmittel zu kontaminieren.
 4. Desinfizieren Sie das Handstück, indem Sie die Außenflächen, vor allem die Spitze, mit einem Desinfektionsmittel in Krankenhausqualität abwischen.
 5. Desinfizieren Sie das Fenster der Handstücks mit einem mit 70%igem Isopropylalkohol getränkten Tuch. Lassen Sie das Fenster vor der Anwendung vollständig an der Luft trocknen.
-