

SculpSure Reinigungs- und Desinfektionsanleitung

Pflege und Handhabung: Außenseite des Systems

Cynosure empfiehlt, die Außenflächen des Lasersystems regelmäßig zu reinigen. Schalten Sie das System vor der Reinigung stets aus. Tragen Sie bei Reinigungsarbeiten Schutzkleidung und eine Schutzbrille gemäß den Anweisungen des Reinigungsmittelherstellers.

Reinigung der Außenflächen des Systems, des Anschlusskabels und Docks (Teile ohne Patientenkontakt).

1. Reinigen Sie die Außenflächen des Systems sowie das Anschlusskabel und das Dock mit einem weichen Tuch, mildem Reiniger und Wasser.
2. Bei Bedarf mit 70%igem Isopropylalkohol reinigen.

Reinigung des Bildschirms.

1. Bereiten Sie eine milde Seifenlauge zu.



ACHTUNG: Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel, Säuren oder Alkalilösungen auf dem Display, da es dadurch beschädigt werden kann.

2. Tauchen Sie ein weiches Tuch in die Lösung und wringen Sie dann das Wasser aus dem Tuch aus.
3. Wischen Sie die Oberfläche des Displays mit dem angefeuchteten Tuch ab.

Reinigung des Gurts und der Schnallen.

1. Reinigen Sie den Gurt und die Schnallen nach jeder Verwendung.
2. Entfernen Sie den Gurt nach der Verwendung vom Rahmen und spülen Sie die Teile mit warmem Leitungswasser ab, um sichtbare Verschmutzungen zu entfernen. Die Schnallen nicht vom Gurt entfernen.
3. Legen Sie Gurt und Schnallen mindestens 15 Minuten in 70%igen Isopropylalkohol (Isopropanol).
4. Nehmen Sie den Gurt mit den Schnallen aus der Reinigungslösung und lassen Sie die Teile mindestens 15 Minuten lang vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder verwenden.

Reinigung der Pause-Taste.

1. Reinigen Sie die Pause-Taste nach jeder Verwendung.
2. Wischen Sie die Flächen der Pause-Taste mit Patientenkontakt nach der Verwendung mit einem sauberen, mit 70%igem Isopropylalkohol (Isopropanol), z. B. Steris Septihol Sterile Alcohol Solution, befeuchteten Tuch gemäß den Anweisungen des Herstellers ab. Schmutziges Tuch entsorgen.
3. Befeuchten Sie danach ein sauberes Tuch mit 70%igem Isopropylalkohol (Isopropanol), z. B. Steris Septihol Sterile Alcohol Solution, und wischen Sie die Fläche mit Patientenkontakt gründlich zwei (2) Minuten lang ab. Belassen Sie nach dieser Reinigung das Tuch für weitere acht (8) Minuten in ununterbrochenen Kontakt mit den zu reinigenden Oberflächen, indem Sie das Tuch um die Flächen mit Patientenkontakt wickeln. Tuch danach entsorgen.

(Fortsetzung)

4. Überprüfen Sie die Oberfläche mittels Sichtkontrolle mit bloßem Auge, um sicherzustellen, dass sämtlicher anhaftender Schmutz entfernt wurde. Wiederholen Sie den Reinigungsvorgang, falls erforderlich.
5. Lassen Sie die Oberflächen der Pause-Taste vor der Verwendung vollständig trocknen, entweder an der Luft oder mithilfe eines fusselfreien Tuchs.

Reinigung der Kinmmaske


1. Reinigen Sie die Maske nach jedem Gebrauch gründlich.
2. Nehmen Sie Maske und Rahmen nach dem Gebrauch auseinander. Weiter unten finden Sie die Anweisungen zur Reinigung des Rahmens.
3. Mit warmem Leitungswasser abspülen, um sichtbare Verschmutzungen zu entfernen.
4. Wischen Sie die Oberflächen der Maske gründlich mit einem sauberen, mit 70%igem Isopropylalkohol (Isopropanol) angefeuchteten Tuch mindestens 30 Sekunden lang ab.
5. An der Luft trocknen lassen.

Desinfektion der Kinmmaske

1. Reinigen Sie die zerlegte Maske nach jedem Gebrauch wie oben beschrieben.
2. Wischen Sie die Oberflächen des Teils zur Desinfektion gründlich mit einem sauberen, mit 70%igem Isopropylalkohol (Isopropanol) angefeuchteten Tuch mindestens 1 Minute lang ab.
3. An der Luft trocknen lassen.

Reinigung der Rahmen

1. Reinigen Sie jeden Rahmen nach jedem Gebrauch gründlich.
2. Nehmen Sie Maske und Rahmen nach der Verwendung auseinander. und spülen Sie den Rahmen mit warmem Leitungswasser ab, um sichtbare Verschmutzungen zu entfernen.
3. Legen Sie die Teile mindestens 5 Minuten lang in ein Bad aus warmem Leitungswasser.
4. Bürsten Sie den Rahmen/die Schablone unter Wasser mit der mitgelieferten Bürste ab und achten Sie dabei besonders auf alle Fugen und Zwischenräume.
5. Nehmen Sie die Teile aus dem Wasserbad und spülen Sie sie nochmals mit warmem Leitungswasser ab.

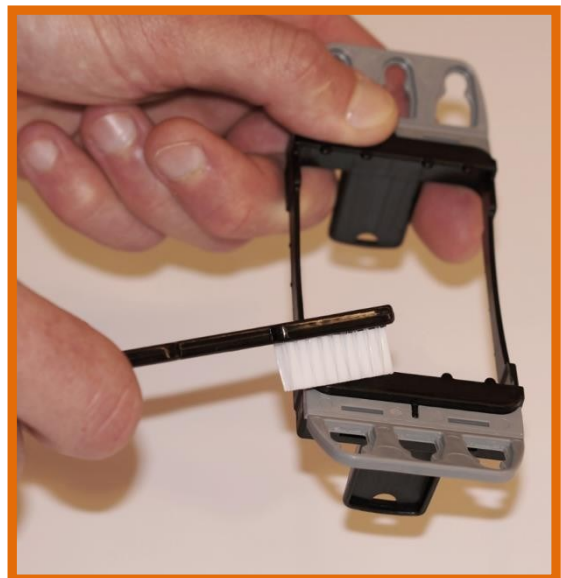

(Fortsetzung)

6. Wischen Sie alle Oberflächen mit einem sauberen, mit 70%igem Isopropylalkohol (Isopropanol) angefeuchteten Tuch ab und lassen Sie die Teile an der Luft trocknen.

Desinfektion der Rahmen

1. Reinigen Sie die zerlegten Teile nach jedem Gebrauch wie oben beschrieben.
2. Legen Sie die gereinigten Teile mindestens 15 Minuten lang in 70%igen Isopropylalkohol (Isopropanol).
3. Nehmen Sie die Teile aus der Lösung und lassen Sie sie mindestens 15 Minuten lang vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder verwenden.

(Fortsetzung)

Reinigung des Applikators


1. Reinigen Sie die Flächen des Applikators mit Patientenkontakt gründlich nach jeder Anwendung.
2. Befeuchten Sie die mitgelieferte Bürste mit warmem Leitungswasser, schütteln Sie überschüssiges Wasser ab und bürsten Sie die Oberfläche des Applikators vorsichtig ab. Achten Sie dabei besonders auf die Ritzen um die grauen Kontaktsensorblöcke.
3. Befeuchten Sie ein sauberes Tuch mit warmem Leitungswasser und wischen Sie die Oberflächen des Applikators mit Patientenkontakt mindestens 30 Sekunden lang gründlich ab. Beachten Sie dabei, dass das Tuch feucht, nicht nass sein sollte.
4. Befeuchten Sie ein sauberes Tuch mit 70%igem Isopropylalkohol (Isopropanol) und wischen Sie die Oberflächen des Applikators mit Patientenkontakt mindestens 30 Sekunden lang gründlich ab.
5. Lassen Sie die Oberflächen des Applikators vor der Verwendung vollständig trocknen, entweder an der Luft oder mithilfe eines fusselfreien, saugfähigen Tuchs.



(Fortsetzung)

Desinfektion des Applikators

1. Wischen Sie die Flächen des Applikators mit Patientenkontakt nach der Verwendung mit einem sauberen, mit 70%igem Isopropylalkohol (Isopropanol), z. B. Steris Septihol Sterile Alcohol Solution, befeuchteten Tuch gemäß den Anweisungen des Herstellers ab. Schmutziges Tuch entsorgen.
2. Befeuchten Sie danach ein sauberes Tuch mit 70%igem Isopropylalkohol (Isopropanol), z. B. Steris Septihol Sterile Alcohol Solution, und wischen Sie die Fläche mit Patientenkontakt gründlich zwei (2) Minuten lang ab. Belassen Sie nach dieser Reinigung das Tuch für weitere acht (8) Minuten in ununterbrochen Kontakt mit den zu reinigenden Oberflächen. Tuch danach entsorgen.
3. Überprüfen Sie die Oberfläche mittels Sichtkontrolle mit bloßem Auge, um sicherzustellen, dass sämtlicher anhaftender Schmutz entfernt wurde. Wiederholen Sie den Reinigungsvorgang, falls erforderlich.
4. Lassen Sie die Oberflächen des Applikators vor der Verwendung vollständig trocknen, entweder an der Luft oder mithilfe eines fusselfreien, saugfähigen Tuchs.

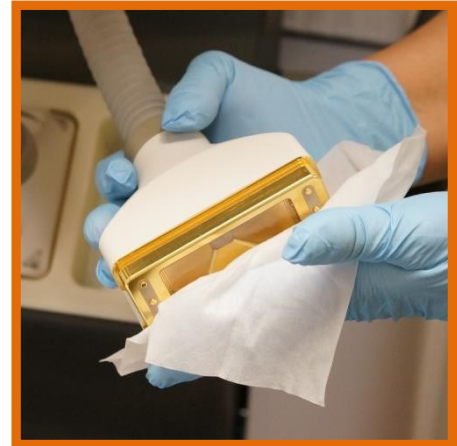

Reinigung des Docks

1. Reinigen Sie das Dock nach jeder Verwendung.
2. Wischen Sie die Innen- und Außenflächen des Docks mit Patientenkontakt nach der Verwendung mit einem sauberen, mit 70%igem Isopropylalkohol (Isopropanol), z. B. Steris Septihol Sterile Alcohol Solution, befeuchteten Tuch gemäß den Anweisungen des Herstellers ab. Schmutziges Tuch entsorgen.
3. Befeuchten Sie danach ein sauberes Tuch mit 70%igem Isopropylalkohol (Isopropanol), z. B. Steris Septihol Sterile Alcohol Solution, und wischen Sie die Innenfläche des Docks gründlich zwei (2) Minuten lang ab. Tuch danach entsorgen.
4. Überprüfen Sie die Oberfläche mittels Sichtkontrolle mit bloßem Auge, um sicherzustellen, dass sämtlicher anhaftender Schmutz entfernt wurde. Wiederholen Sie den Reinigungsvorgang, falls erforderlich.
5. Lassen Sie die Oberflächen des Docks vor dem Einsetzen des Applikators vollständig trocknen, entweder an der Luft oder mithilfe eines fusselfreien, saugfähigen Tuchs.