

Vectus Reinigungs- und Desinfektionsanleitung

Reinigung von Handstück und Basismodul

Cynosure empfiehlt eine Reinigung und Desinfektion zwischen den behandelten Personen wie in der Folge beschrieben.



- Während der Reinigung und Desinfektion muss das Vectus Lasersystem ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden.
- Reiner, unverdünnter Alkohol oder Reiniger sollten nicht verwendet werden.
- Das Handstück und die Saphiroptik müssen vor und nach jeder Behandlung gereinigt und desinfiziert werden. Zudem muss das Lichtemissionsfenster zwischen den Behandlungen regelmäßig abgewischt werden, um Haare und andere Rückstände zu entfernen.
- Für den Fall, dass ein Handstück mit Schleimhäuten, geschädigten, infizierten, blutenden oder anderweitig potenziell infektiösen Hautbereichen in Kontakt kommt, empfiehlt Cynosure, das Handstück mit einem von der US-Umweltschutzbehörde zugelassenen Desinfektions-/Reinigungsmittel zu reinigen, z.B. Sani-Cloth® Plus, LpHse® oder Birex®. Bitte befolgen Sie die Anweisungen des Reinigungsmittelherstellers.
- Reinigung zwischen Behandlungen verschiedener Personen: Reinigen Sie das Basismodul und Anschlusskabel mit Mull oder einem Tuch, die mit einer Mischung aus 70% Alkohol und 30% Wasser befeuchtet sind. Cynosure empfiehlt, das Fenster des Handstücks mit einem von der US-Umweltschutzbehörde zugelassenen Desinfektions-/Reinigungsmittel zu reinigen, z.B. Sani-Cloth® Plus, LpHse® oder Birex®. Bitte befolgen Sie die Anweisungen des Reinigungsmittelherstellers.
- Während der Behandlung derselben Person: Cynosure empfiehlt die Verwendung von Mull oder einem Tuch, die mit einer Mischung aus 70% Alkohol und 30% Wasser befeuchtet sind.



ACHTUNG: Tauchen Sie die Handstücke des Vectus Lasersystems niemals in Lösungen ein, da dies eine Gefahrsituation für die Bedienperson und möglicherweise auch die behandelte Person darstellt. Zudem kann dies auch zu einer Fehlfunktion des Vectus Lasersystems führen.